

CALL-DEXの使い方

各部名称



仕様

寸法：22×9×12mm（長さ×幅×高さ）

重さ：9g

使用電池：空気亜鉛電池PR536（10Aタイプ）

連続使用時間：最大80時間

使用方法


CALL-DEXとスマートフォンの接続

CALL-DEXに電池を入れ、携帯電話・スマートフォンの3.5mmイヤホンジャックにイラストのようにプラグを差し込むだけです。

CALL-DEXと補聴器のペアリングは不要です。



プラグがしっかり差し込まれていないと接続できませんので、スマートフォンケースをお使いの方はご注意ください。

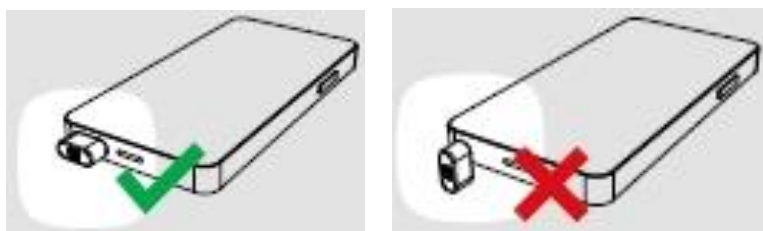

通話の仕方

発信・着信の後、CALL-DEXを接続したスマートフォンを耳にあて、普段と同じように通話してください。

特別なかけ方、話し方をする必要はありません。



! スマートフォンのマイク設定

一部のスマートフォンでは、イヤホンジャックにプラグが差し込まれると、スマートフォン側のマイクが自動的にオフになるものがあります。このスマートフォンでCALL-DEXをお使いになると、相手の声はCALL-DEX経由で補聴器に届きますが、スマートフォンのマイクがオフになっているので、こちらの声が相手には届きません。CALL-DEXをお使いになる前にスマートフォンの設定でマイク入力を変更してください。

<NTTドコモ らくらくスマートフォン3 F-06F>

<ソフトバンク シンプルスマホ 204SH>


<NTTドコモ らくらくスマートフォン4 F-04J>

下記手順で「端末のマイク」に設定変更。

ホーム画面で設定を選択。接続するイヤホンの種類を「マイクなし」に変更。

◆マイク入力の設定

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動・タッチの設定] ▶ [マイク入力]
シンプル：待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動・タッチの設定を行う] ▶ [マイク入力を設定する]
- 2 **「端末のマイク」** / [イヤホンマイク]
・マイクなしのステレオイヤホン接続時は「端末のマイク」を選択してください。
- 3 [OK]

設定変更した後でCALL-DEXを接続すると、通知アイコンに「」が表示されます。



外部接続画面で イヤホンの種類 → **「マイクなし」** / マイクあり