


DEX™

**COM-DEX
Remote Mic**


GB
DE
FR
ES
DK
IT
JP
US

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING


1

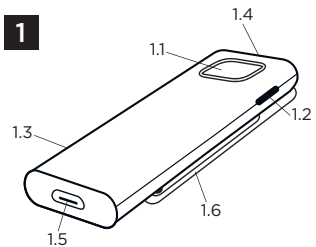

2

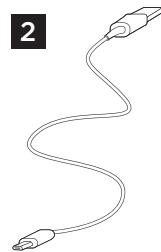

3

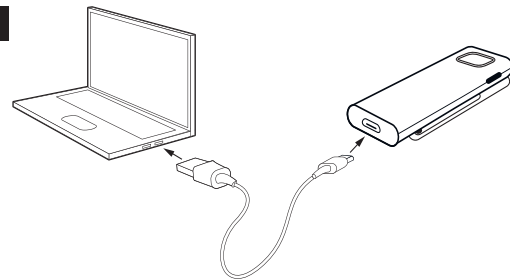

GB	USER INSTRUCTIONS	3
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	13
FR	MODE D'EMPLOI	23
ES	INSTRUCCIONES DE USO	33
DK	BRUGSANVISNING	43
IT	LIBRETTO D'ISTRUZIONI	53
JP	取扱説明書	63
US	USER INSTRUCTIONS	73
	FCC AND IC STATEMENTS	97

装置の説明 - 図 1 を参照

- 1.1 ストリーミングボタン
- 1.2 電源ボタン
- 1.3 LED
- 1.4 マイクと LED
- 1.5 充電ポート
- 1.6 クリップ

使用目的

COM-DEX Remote Mic は、補聴器に接続された COM-DEX に音を転送するための無線が統合されたマイクです。補聴器をお使いの方が、聞き取りにくい状況で話し声を聞き取りやすくすることを目的としています。**本装置と COM-DEX を最適な状態で接続するためには、両装置が近くにある必要があります。**

付記

Remote Mic は COM-DEX 専用です。

付属品 - 図 2 を参照

USB ケーブル

装置の使用方法

装置の充電 - 図 3 を参照

USB ケーブルを装置と電源に接続してください。装置の充電には約 3 時間かかります。

付記

装置を使用する前に、USB ケーブルを取り外してください。
バッテリー駆動時間:ストリーミング時 8 時間。

装置の電源のオン/オフ

装置の電源をオンにするには：

- 電源ボタンを 3 秒間押し続けます。

装置の電源をオフにするには：

- 電源ボタンを 3 秒間押し続けます。

30 分以上音声のストリーミングがない場合、装置の電源は自動的にオフに切り換わります。

装置のペアリング

装置と COM-DEX のペアリング

装置を COM-DEX に初めてペアリングする場合には以下の手順に従ってください:

1. COM-DEX がペアリングモードに設定されていることを確認します。
2. 装置の電源をオンにします。これを初めて行う場合、装置はペアリングモードとなり、COM-DEX に自動的に接続されます。これには数分かかることがあります。

付記

装置と COM-DEX とのペアリングが完了するとペアリングモードが維持され、COM-DEX の電源がオンの場合には COM-DEX に自動的に接続されます。

COM-DEX Remote Mic をリセットして新たにペアリングする場合:

1. 装置の電源をオンにします。
2. 両方のボタンを 5 秒間押し、装置を工場設定にリセットします。装置はペアリングモードに設定されます。
3. 上記のペアリングの手順にしたがって操作します。

装置の使用方法 - 図 4 を参照

装置の使用前に保護フィルムを取り除きます。

声を聞きたい相手の服の襟元に装置をつけます。

装置の電源をオンにします。

ストリーミングの開始と停止には、Remote Mic のストリーミングボタンを押してください。ストリーミング中、LED は緑色で点灯します。

付記

装置を COM-DEX アプリで使用する場合、アプリをアップデートする必要があります。

音の調節

装置から COM-DEX へのストリーミング音声は、3段階で調節できます。装置側面の電源ボタンを押すと音声レベルが3段階で順に切り替わります（最高レベル-最低レベル-通常レベルに戻る）。

ライトインジケータ - 図5を参照

装置には、異なる色で点滅する2つのLEDが搭載されています。色により、装置に設定されているモードが示されます。

- **下部の** LED が赤色で点灯:装置は充電中です。
- **下部の** LED が緑色で点灯:装置はフル充電されています。
- **両方の** LED が青-赤-青-赤と交互に点滅:装置のペアリングが可能です。
- **上部の** LED が青色で点滅:装置の電源はオンになっていますが、ペアリングする COM-DEX には接続されていません。
- **上部の** LED が緑色で点滅:装置の電源はオンで COM-DEX に接続されていますが、ストリーミングは行われていません。

- **上部の** LED が緑色で点灯:装置の電源はオンでストリーミングが行われています。
- **両方の** LED が時折赤色で点滅:バッテリーが少なくなっています。

メンテナンス

- 装置は湿った布できれいにしてください。液体や化学薬品を使用したり、液体に浸さないでください。
- 装置を使用しない場合は、子供およびペットの手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- 絶対にご自分で分解、または修理しようとししないでください。認定技術者のみが実施します。

トラブルシューティング

問題点	考えられる要因	解決策
装置が作動しない	<ol style="list-style-type: none">1. Remote Mic のバッテリーレベル低下2. COM-DEX のバッテリーレベル低下3. 通信範囲外	<ol style="list-style-type: none">1. Remote Mic のバッテリーを充電します2. COM-DEX のバッテリーを充電します3. 両方の装置を近くに置きます (最高 10m)
音が出ない	<ol style="list-style-type: none">1. COM-DEX とペアリングされな2. COM-DEX が補聴器の通信範囲外にある3. 補聴器のバッテリーレベル低下	<ol style="list-style-type: none">1. ペアリングの手順を繰り返します2. 通信範囲に移動します3. 補聴器のバッテリーを交換します

問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。詳細はウェブサイトをご覧ください: www.widex.com

警告



鉱山などの爆発性ガスが存在する可能性がある区域では装置を使用しないでください。



極度の高温または高い湿度にさらさないでください。



マイクロ USB ケーブルで装置を充電器、PC、音源、その他の外部装置に接続する場合、この装置は IEC 60065、IEC 60950-1、IEC 60601-1 または同等の安全規格に遵守している必要があります。

規制情報

指令 1999/5/EC

ここに、Widex A/S は、この COM-DEX Remote Mic が指令 1999/5/EC の基本的要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

適合宣言のコピーを以下に掲載します。

www.widex.com/doc



N26346

処分に関する情報

補聴器やその付属品、電池を通常の廃棄物として処分しないでください。

補聴器やその付属品、電池については、地区の定める電気・電化製品の処分方法に従って処分するか、購入元へ処分を依頼してください。

記号

ワイテックス株式会社が製造販売する管理医療機器の表示（ラベルや取扱説明書など）に共通して使用される記号

記号 タイトル/説明



製造元

製品の製造者名、製造所の所在地。製造年月も記載される場合があります。



カタログ番号

製品のカタログ（品目）番号



取扱説明書を参照

取扱説明書には安全に関する重要なお知らせ（重要/注意）が記載されていますので、製品のご使用前に必ずお読みください。



警告

警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読みください。



WEEE マーク

「一般廃棄物ではありません」製品の廃棄については、危険物質があるために環境や人の健康を害するリスクを防ぐため、指定されたりサイクル・回収場所に廃棄してください。

記号 タイトル/説明



CE マーク

製品は、CE マークに関する欧州指令によって定められた要件に適合しています。



RCM マーク


製品は、オーストラリアとニュージーランド市場に供給される製品に対する電気安全、EMC、無線スペクトル規制要件に準拠しています。




電磁波による干渉

製品の近くでは電磁波による干渉が起きる可能性があります。

4

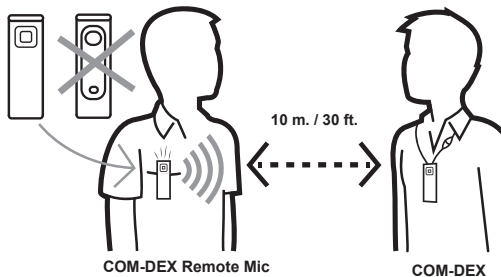

5

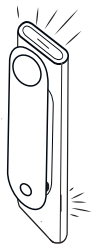

WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngbe, Denmark
www.widex.com



Manual no.:
9 514 0380 080 #02
Issue:
2016-09

