

COM-DEXの使い方 <アプリ編>


COM-DEXアプリを使って補聴器を操作する場合には、アプリをインストールします。

< iPhoneの場合 >


1. ホーム画面の「AppStore」をタップします。




2. 検索ワードに「widex」と入力し、検索します。

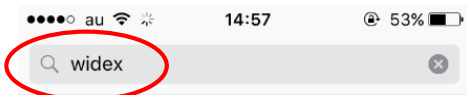

3. 「**入手**」または「」をタップし、COM-DEXアプリをダウンロードします

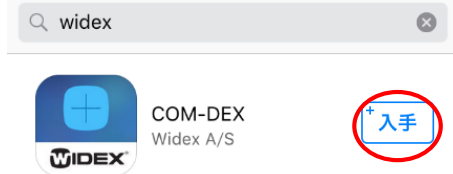

4. 「**開く**」ボタンで、COM-DEXアプリを起動します。

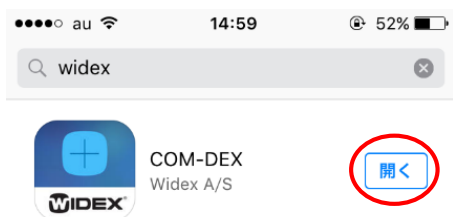



2回目以降の起動は、ホーム画面に作成されている「COM-DEX」アイコンから起動します。




< Androidの場合 >

1. 「Playストア」をタップして、「Googleプレイ」画面を表示します。




「Playストア」アイコンは、ホーム画面 ・ のアプリリスト内にあります。

2. 検索ワードに「widex」と入力し、検索します。

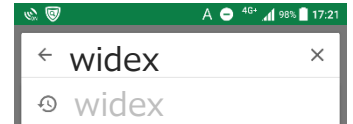

3. 「COM-DEX」をタップします。

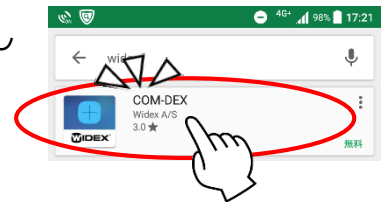

4. 「インストール」をタップし、COM-DEXアプリをダウンロードします。



5. 「開く」ボタンで、COM-DEXアプリを起動します。




COM-DEXアプリ 操作ガイド

- COM-DEX専用アプリ 対応OS・端末
 - iPhone 4S、iOS 8.0以降
 - Android 4.4以降

COM-DEXアプリの起動

1. ホーム画面上のCOM-DEXアプリをタップします。

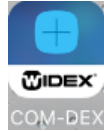


2. ペアリング済みのCOM-DEXが表示されます。COM-DEXをタップします。



ボタンで音量を上げます。




ボタンで音量を下げます。

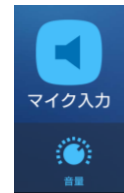

通信中はマイク入力が表示され、補聴器のマイクのオフ・オンができます。

プログラム切り替え画面

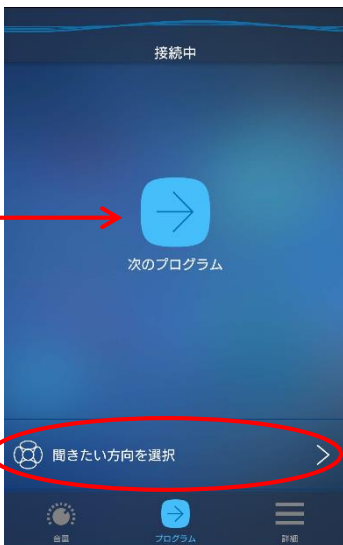

フリーフォーカス画面



詳細画面



ボタンを押すごとに次のプログラムに切り替わります。(補聴器にプログラム設定がされている場合)

「聞きたい方向を選択」をタップすると「フリーフォーカス」画面になります。聞きたい方向を選択します。

※CICは前後は選択できません。

※片耳装用の場合、左右は選択できません。

ヘルプやCOM-DEXの電池残量の確認、壁紙の変更などができます。

COM-DEXアプリの更新

COM-DEXアプリの新しいバージョンが公開されると、スマートフォンに通知が送られますので、アプリを更新してください。 ※自動的に更新される場合もあります。

COM-DEXアプリが新しいバージョンへ更新された後で、動作に問題が生じた場合は、COM-DEXをお求めいただいた店舗へご相談ください。COM-DEX本体のソフトウェアの更新が必要になる場合があります。

COM-DEXアプリが繋がらなくなったら・・

次のような場合、アプリ起動時の接続に時間がかかる場合があります。

- COM-DEXで通信（通話、音楽・動画再生）した後、COM-DEXアプリを起動した場合
- スマートフォンから離れてしまい、Bluetooth接続が切断され、再度接続した後にCOM-DEXアプリを起動した場合

このような画面（COM-DEXを選択）になったら

COM-DEX本体の正面ボタンを押してください。



リモコン操作ができるようになるまでに
数秒から1分程度かかる場合があります。

COM-DEXがスマートフォンにBluetooth接続されているかどうかの確認

スマートフォン画面に、ヘッドホンのアイコン



が表示されていれば OK です。

< iPhone >



< Androidの一例 >



ヘッドホンのアイコンが消えて、グレーのBluetooth アイコン
COM-DEXと接続されていません。



に変わっているときは、

< iPhone >




< Androidの一例 >



2～3分待っても再接続できない場合

一度COM-DEXのネックループを外し、少したってから再度ネックループをつないでみてください。

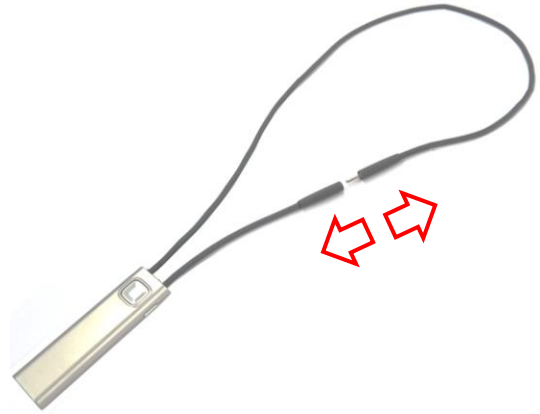

ウィジェットの活用（Androidのみ）

Android版COM-DEXアプリでは、ウィジェットと呼ばれる小さなアプリ画面を常に画面上に表示しておき、操作することができます。補聴器の操作を行うのに毎回COM-DEXアプリを起動する手間が省け、便利です。（※Android版のみ）



※ウィジェットの追加方法は、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。