

# TONELINKアプリ 設定・操作ガイド

## ToneLinkアプリとは？


ToneLink（トーンリンク）アプリを使うことで、スマートフォンからEVOKE（イヴォーク）をリモコン操作できます。

## アプリのダウンロード

App Store（iOS）、Play Store（Android）で、「widex」と検索し、ToneLinkアプリをダウンロードしてください。

<対応OSのバージョン>

- Apple: iOS 10.x and 11.x以降 ※Apple Watchはサポートしていません。
- Android: OS version 6.01以降

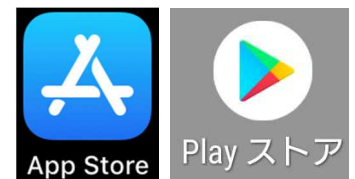

## EVOKEとのペアリング手順

1. ToneLinkアプリをタップします。



2. 「アプリの利用を開始する」をタップします。




### 注意：外部音源の接続

スマートフォンがCOM-DEXやBluetoothヘッドフォンなどストリーミングできる機器に接続している場合、ToneLinkアプリが使用できません。ToneLinkアプリを使う際はこれらの機器の接続を解除してください。




3. ToneLinkアプリの仕組み・免責条項画面で下までスクロールし、「同意します」をタップします。

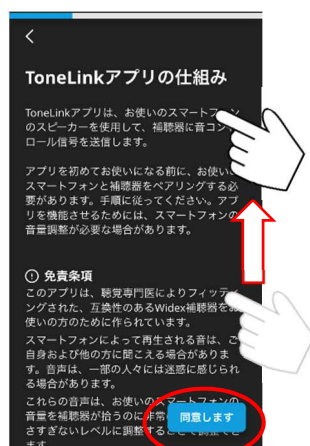

4. EVOKEの電源をオフにし、3秒以上経過してから電源を再びオンにし、補聴器を装着してください。準備ができれば、「次へ」をタップします。



5. 「ペアリング」をタップします。

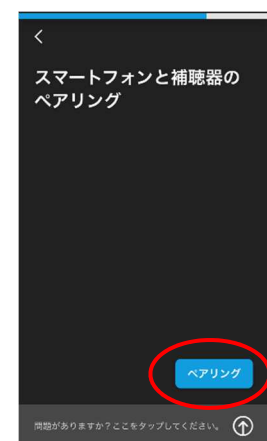

裏面へ続きます。

6. 補聴器から確認音が鳴ります。聞こえたら「はい」をタップし、7.へ進んでください。  
聞こえなかったら「いいえ」をタップし、下の「確認音が聞こえなかった場合」をご覧ください。

7. ペアリングに成功したら、「早速使ってみましょう」をタップします。  
ToneLinkアプリのメイン画面が表示されます。



確認音が聞こえなかった場合  
スマートフォンの音量を下のスライダーを左右に動かして調整してください。




調整後、「ペアリング」をタップし、EVOKEとペアリングします。



## TONELINKアプリ画面

ToneLinkアプリのそれぞれのボタンの名称と機能です。

**メニューボタン：**  
アプリのバージョン確認や別のEVOKEとペアリングする際にタップします。

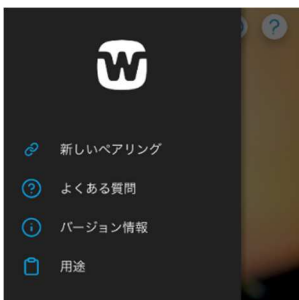


**プログラム切替ボタン：**  
プログラムを複数設定している場合、次のプログラムに切り替わります。

**ミュート（消音）ボタン：**  
タップすると消音になります。




**スマートフォン音量ボタン：**  
ToneLinkアプリでEVOKEの操作ができない場合、スライダーを動かしてスマートフォンの音量を調整してください。

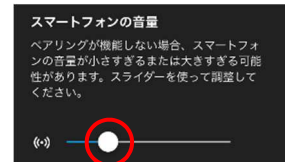

**ヘルプボタン**

**指向性ボタン：**  
聞きたい方向を選択します。

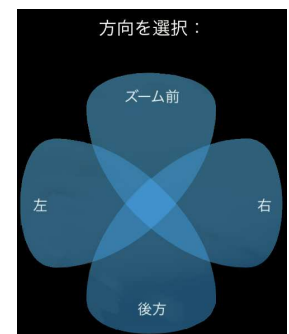

**優先コントロールボタン（音量調節）**