



# 各部の名称と 電池の交換の方法



## CICタイプ

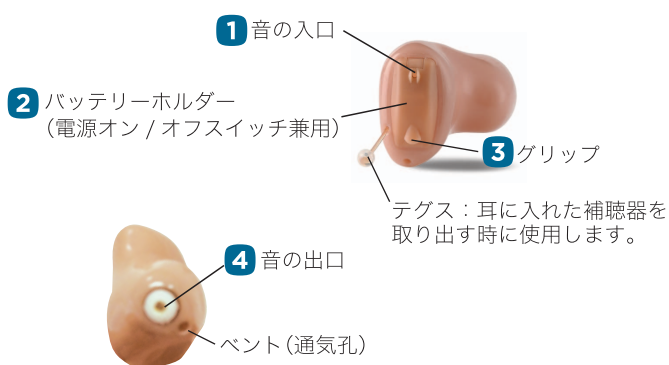


### 電池交換方法

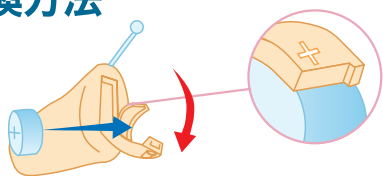


グリップに爪をかけ、ゆっくりとホルダーを開きます。その時、ホルダーを止まった位置以上に無理に開かないように注意してください。電池のプラス記号(+)がバッテリーホルダーに印刷されたプラス記号の方向に向くように電池を挿入します。電池が正しく挿入されたら、バッテリーホルダーを閉じてください。

## カナルタイプ

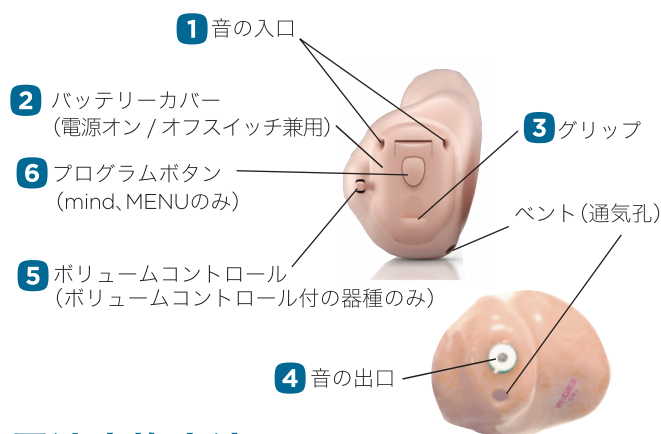

### 電池交換方法

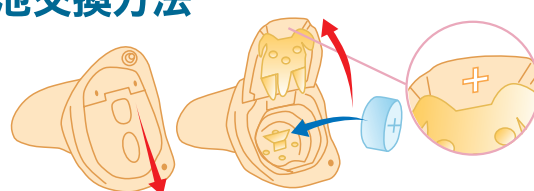

グリップに爪をかけ、バッテリーカバーを少し下にスライドさせてから上方に開きます。電池のプラス記号(+)が表になるように電池を挿入します。カバーの裏面にも小さなプラス記号が刻印されています。電池が正しく挿入されたら、バッテリーカバーを閉じてください。

### 各部の機能

- 音や声はここから補聴器に入ります。(入音口が1つの場合と2つの場合があります)
- 電池はこの中に挿入します。(電源オン/オフスイッチを兼用しています)
- ここに爪をかけてバッテリーホルダー/カバーを開きます。
- 補聴器で増幅された音はここから出て、耳に入ります。
- 音の大きさを微調整する時に使います。器種により付けられない場合があります。
- リスニングプログラムは、このボタンで切り替えます。ただし、テレコイルは、オプションとして付加した場合のみ使用できます。器種により付けられない場合があります。