


各部の名称と 電池の交換の方法



耳かけ型 9モデル



電池交換方法

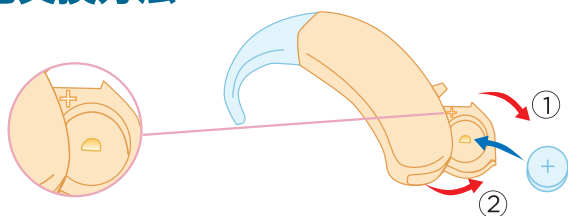


グリップに爪をかけ、①方向に引きます。その後、②方向に押し上げるようにしてバッテリーホルダーを開きます。電池のプラス記号(+)がある面を上にして挿入します。電池が正しく挿入されたら、バッテリーホルダーを閉じてください。

耳かけ型 FAモデル SUPERモデル



電池交換方法

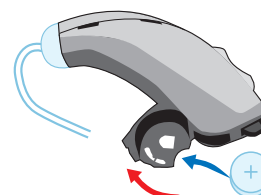

グリップに爪をかけ、ゆっくりと矢印の方向に押し、バッテリーホルダーを開きます。電池のプラス記号(+)がある面を上にして挿入します。電池が正しく挿入されたら、バッテリーホルダーを閉じてください。

各部の機能

- 1 音や声はここから補聴器に入ります。
- 2 電池はこの中に挿入します。
(電源オン/オフスイッチを兼用しています)
- 3 ここに爪をかけてバッテリーホルダーを開きます。
- 4 補聴器で増幅された音はここから出て、耳に入ります。
- 5 音の大きさを微調整する時に使います。
- 6 リスニングプログラムは、このボタンで切り替えます。