

# DRY-GO UVの使い方

## 各部名称



## 付属品一覧



ACアダプター



電源ケーブル



トラベルケース



マグネットシート



クリーニングクロス

## 使用方法

1) 電源ケーブルとACアダプターを接続します。

USBマークが上に来るように接続



電源ケーブルをACアダプターの奥まで挿し込んでも3mm程度隙間ができます。

2) 電源ケーブルとDRY-GO UVを接続します。



3) コンセントにACアダプターを取り付けます。



4) 補聴器から空気電池を取り外します。

補聴器から取り出した空気電池は、DRY-GO UVに付属のマグネットシートの上に置いてください。



※注意：マグネットシートは、DRY-GO UV本体に貼らないでください。

5) DRY-GO UVの蓋を開けます。



6) バッテリードアを開けたまま、補聴器とイヤモールドをDRY-GO UVの中に入れます。



7) 電源ボタンを軽くタッチします。



電源ボタンをタッチするとLEDランプが点灯します。

8) DRY-GO UVの蓋を閉めます。



動作開始後と終了前の4分間に紫外線が照射されます。紫外線照射中は青色の点滅でお知らせします。紫外線照射中に蓋を開けると、自動的に紫外線照射を停止する安全装置付きです。



9) 4時間後、乾燥・紫外線照射が自動停止し、LEDライトも消灯します。蓋を開けて補聴器とイヤモールドを取り出します。



※自動停止以外に電源ボタンを3秒以上タッチすると運転を停止します。

使用上の注意

- ・DRY-GO UVの動作中は温かくなります(DRY-GO UV内部で約50℃)。熱に弱いものや燃えやすいものの近くではお使いにならないでください。
- ・小さなお子様の目に届く場所で使用しないでください。
- ・長期間、補聴器を使用しない場合、補聴器は乾燥ケースに入れて保管してください。