

## WIDEX CROS のご使用上の注意

○ WIDEX CROS とは、一側聾などの聞こえにくい側の音を反対耳側へ無線で送る器械です。

WIDEX CROS には、ボリュームレバー付きの CROS-FA とボリュームレバーのない CROS-FS があります。



● WIDEX CROS を使わない時に、補聴器の他のプログラムをお使いいただけます。



● WIDEX CROS と補聴器が通信中は、補聴器のプログラムは切り替えられません。



● マスタープログラム以外のプログラムを使用している場合、WIDEX CROS からの送信が始まるとマスタープログラムの音に戻ります。  
マスタープログラム以外の他プログラムで WIDEX CROS をお使いいただけません。



● WIDEX CROS からの送信が止まると、1 番目のプログラムに戻ります。  
他のプログラムを使う場合は、補聴器側のプログラムボタンで切り替えてください。



● WIDEX CROS が送信中の時に、CROS-FA のボリュームコントロールでボリュームを上げると、CROS-FA を装着している側の音が大きくなり、反対にボリュームを下げると音が小さくなります。



ワンポイント：WIDEX CROS で通信中、補聴器側のボリュームレバーを操作すると？

- クロス設定の場合：WIDEX CROS 側の音のみ大きく、または小さくなります。
- バイクロス設定の場合：WIDEX CROS 側の音だけでなく、補聴器のマイクの音も大きく、または小さくなります。

● WIDEX CROS が送信中に DEX 機器はお使いいただけません。

