

# UNI-DEX の各部名称と使い方

## 首掛け用コード

(アンテナ兼用)

## マイクロホン

スマートフォンで通話するときは、ここに話しかけます。

## 充電表示ランプ

赤ランプ点灯：充電中

緑ランプ点灯：充電完了

## 充電コネクター

付属の電源アダプターとつないで充電します。  
1回の充電で、通信時は約40時間、待機時で約4ヶ月です。(1時間の高速充電)

## コネクター

装着しづらいときは、コネクターを外して装着します。

## プッシュボタン

スマートフォンで電話に出るときや電話を切るときに押します。

## マイクオフボタン

通話中や音楽の再生中にこのボタンを押すと補聴器のマイクがオフになり、電話の音声や音楽だけがよく聞こえます。

## ミニプラグ

スマートフォンや音楽プレーヤー等につなぎます。